

Není vyrobeno z latexu		LATEX FREE	
Indikátor rozsahu obvodu paže, který pomáhá volbě správné velikosti manžety.		REF	
Referenční katalogové číslo		Manžeta Easy Cuff	
Manžeta Intelli Wrap		Komfortní manžeta	
Technologie společnosti OMRON Healthcare, Japonsko		Datum výroby	
Uživatel si musí prostudovat návod k obsluze.		Obvod paže	
Datum výroby je součástí sériového čísla, které je umístěno na produktu a/nebo prodejním balení: první 4 číslice představují rok výroby, další 2 číslice měsíc výroby a poslední 2 číslice den výroby.			

CELIMED

Popis symbolů	
CE UK CA	Označení CE
UK CA	Značení UKCA
LOT	Číslo šarže
UDI	Jedinečný identifikátor prostředku
MD	Zdravotnický prostředek
Indikátor umístění manžety pro levou ruku	Indikátor umístění manžety pro levou ruku
INDEX	Ukazatel rozsahu a poloha pro zarovnání na brachiální tepnu
ART.	Značka na manžetě musí být umístěna nad artérií.

Tento produkt společnosti OMRON je vyroben v souladu s přísným systémem pro kontrolu kvality společnosti OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., JAPONSKO.
Veškeré závažné incidenty, k nimž došlo v souvislosti s tímto prostředkem, nahlašujte výrobci a odpovídajícím úřadům členského státu EU, ve kterém se nacházíte.


Ukladnění/řepravní podmínky	-20 až +60 °C (-4 až 140 °F) 10 až 95 % relativní vlhkosti (bez kondenzace) 700 až 1060 hPa
Hmotnost	Nepřesahuje 187 g
Obsah balení	Manžeta, návod k obsluze, vzduchové zástrčky
Zivotnost (provozovatelnost), záruka	1 rok

CELIMED

CE UK CA

OMRON

Manžeta Easy Cuff

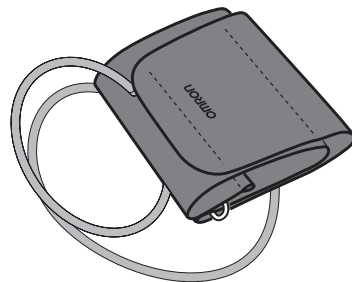

HEM-RML31

Manžeta měřiče krevního tlaku OMRON

• Návod k obsluze

2 CZ


Výrobce	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPONSKO	
Zástupce pro EU	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NIZOZEMSKO www.omron-healthcare.com	
Dovozce do EU		
Výrobní závod	OMRON DALIAN Co., Ltd. No.3 Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600 Liaoning, Čínská lidová republika	
Pobočky	Dovozce ve Spojeném království a zodpovědná osoba pro UK	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH / OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors	
Distribuce a servis pro ČR	CELIMED s.r.o. Sociální péče 3487/5a, 400 11 Ústí na Labem požáruční servis - tel.: 475 208 180, e-mail: info@celimed.cz www.celimed.cz	

Vyrobeno v Číně

All for Healthcare

IM-HEM-RML31-E-CZ-07-10/2022

Datum vydání: 2022-12-14

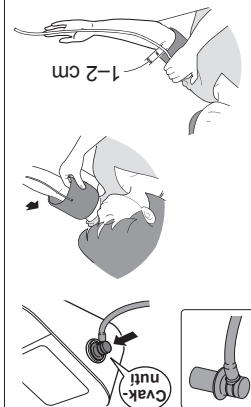

Návod k obsluze

- Tuto manžetu spočítosti OMRON lze připojit k různým měřicím tlaku
- Tato manžeta funguje pouze s měřicí krevního tlaku OMRON kompatibilními se systémem HEM-RML31, jak je uvedeno na štítku manžety vedle vzduchového konektoru.
- Ověřte si, kterou zástřku na vašem přístroji je třeba použít. Při použití nesprávné zástřky může dojít k úniku vzduchu a nesprávným výsledkům.
- Manžetu neperete ani nemanávejte.

Upozornění: Označuje potenciálně nebezpečné situace, které – pokud jim nezabráníte – mohou vést k lehkému nebo středně těžkému zranění uživatele či pacienta nebo k poškození vybavení či jiných předmětů.

Z bezpečnostních důvodů je nutno pozorně dodržovat tento návod. Návod si ponechte pro budoucí použití. Pokud požadujete konkrétní informace o

OMRON HEM-RML31 spočítosti OMRON. Tato manžeta je vhodná pro obvod paže od 22 do 42 cm. Viz původní návod k obsluze vašeho měřice krevního tlaku.



OMRON
HEM-RML31


Spodní okraj manžety by se měl nacházet přibližně 1 až 2 cm nad loktem. Vzduchová hadička je umístěna na střední vnější straně Vaší paže, rovnoběžně s prostředním křemem.

2. Nasadte si manžetu na levou paži a upevněte.

Poznámka: Pokud používáte vzduchovou zástřku 1. Zasuňte vzduchovou zástřku pevně do vzduchového konektoru.

Svíklejte si z levé paže těsně přiléhající oděv a silnější obléčení jako například svetr. Nepřikládejte manžetu přes silné obléčení a nevyhnujte si rukáv, je-li příliš těsný.

POZNÁMKY

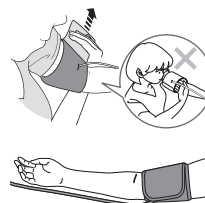

CELIMED

Měření na pravé paži

Vzduchová hadička bude na straně Vašeho lokte. Dávejte pozor, abyste si paži o ni neopírali.

Poznámka: Krevní tlak na levé a pravé paži se může lišit, a proto také naměřené hodnoty krevního tlaku mohou být odlišné. Společnost OMRON doporučuje používat k měření vždy stejnou paži. Pokud se hodnoty mezi oběma pažemi podstatně liší, ověřte si u svého lékaře, kterou paži máte k měření používat.

- Manžetu vyčistěte pomocí měkké suché látky, nebo měkké vlhké látky a neutrálního mýdla.
- K čištění manžety nepoužívejte benzín, ředidla ani jiné těkavé kapaliny.
- Manžetu neskladujte na místech vystavených extrémním teplotám, vlhkosti, přímému slunečnímu světlu, prachu nebo korozivním výparům.
- Vzduchovou hadičku nadměrně neohýbejte ani nemačkejte.

Technické údaje:

Popis výrobku	Manžeta měřice krevního tlaku OMRON
Model	HEM-RML31
Obvod paže	22 až 42 cm
Rozměry manžety	Ne více než 653 x 160 mm (v rozloženém stavu)
Rozsah tlaku manžety	Tlak: 0 až 299 mmHg
Přesnost	Tlak: ±3 mmHg
Klasifikace	Třída I
Provozní podmínky	+10 až +40 °C (50 až 104 °F) 15 až 90 % relativní vlhkosti (bez kondenzace) 700 až 1060 hPa

Údržba